


# Så använder du hjärtstartaren LIFEPAK CR2.

Vid misstänkt hjärtstopp: Be någon att larma 112 och hämta hjärtstartaren. Starta HLR omgående.

- 1 **Starta hjärtstartaren** genom att öppna locket. Ta tag i locket vid den röda pilen och lyft. **Följ hjärtstartarens röstinstruktioner**, de kommer att vägleda dig steg för steg.




- 2 **Ta bort alla kläder** från bröstkorgen. Klipp om nödvändigt, torka fuktig hud och raka vid behov. Sax, rakhyvel och andnings-skydd ska finnas i D-HLR-etuiet.

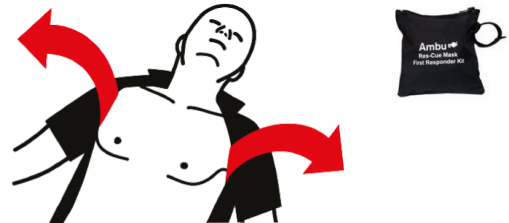


- 3 **Dra i det röda handtaget** för att ta fram elektroderna. **Om det är ett barn** under 8 år eller under 25 kg, tryck först på knappen **barnläge**.




- 4 **Dra bort en elektrod i taget** genom att dra i öglan och **placera elektroden** på bröstkorgen exakt som bilden visar på elektroden. Stryk fast elektroderna ordentligt mot bröstkorgen.

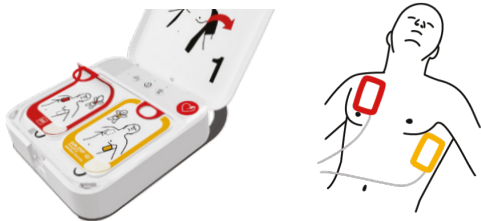

- 5 **Rör inte personen. Hjärtstartaren analyserar** nu hjärtrytmen. Om hjärtstartaren hittar en behandlingsbar rytm kommer den att uppmana dig att trycka på defibrilleringsknappen.

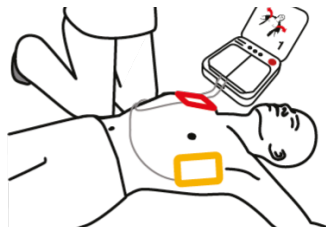

- 6 **Tryck på den röda blinkande knappen** om defibrillering rekommenderas. **Se till att ingen är i fysisk kontakt med personen.**

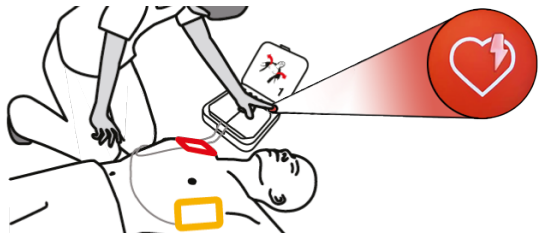

- 7 **Starta hjärt-lungräddning.** Låt elektroderna sitta kvar. HLR ska pågå med så få avbrott som möjligt. **Fortsätt att följa hjärtstartarens instruktioner.** Med två minuters mellanrum upprepas analysen. **Om personen visar tydliga livstecken** placera om möjligt personen i stabilt sidoläge.

